




Inter-Therm™ T+ HME für die Tracheotomie



Atemwegsmanagement ▪ Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HMEs)

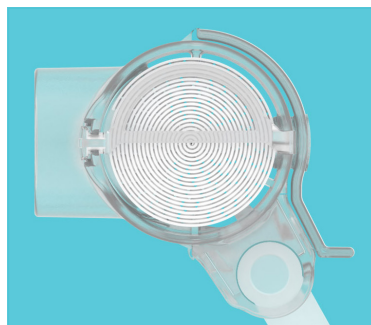

Inter-Therm™ T+

Der InterTherm T+ ist ein Wärme- und Feuchtigkeitstauscher (HME), der für den Einsatz bei spontan atmenden Patienten entwickelt wurde, um den Verlust von Wärme und Feuchtigkeit während der Atmung zu reduzieren.

Wenn ein Patient eine Tracheotomie erhält, wird der natürliche Prozess der Temperatur- und Feuchtigkeitserhaltung durch die Einführung der Trachealkanüle verhindert. Der mögliche Verlust von Wärme und Feuchtigkeit kann zu schwerwiegenden

Komplikationen führen, insbesondere zur Schädigung der Zilien und der schleimproduzierenden Zellen. Dies hat wiederum eine Sekretretention und Atelektasebildung zur Folge, sodass der Tubus möglicherweise verstopft wird.

Der InterTherm T+ verfügt über zahlreiche einzigartige Eigenschaften, die ihn zu einem idealen Produkt für den Langzeitgebrauch bei spontan atmenden Patienten machen.


▶ Video verfügbar unter www.intersurgical.de/info/videos

Sauganschluss zum Anklippen

Ermöglicht schnelles Absaugen, ohne den Filter zu entfernen


Transparentes Gehäuse und weiße HME-Elemente

Erleichtert die Sicht auf mögliche Lungensekrete

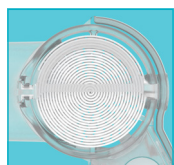

Einzigtartiges Design aus gewelltem Papier

Perfekte Kombination aus Befeuchtungsleistung und geringem Flow-Widerstand

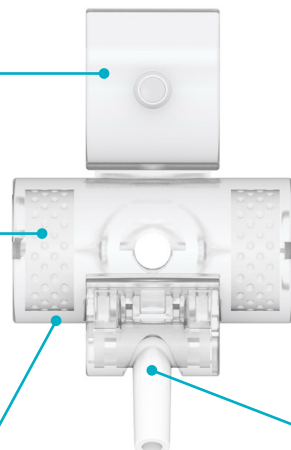

Klein und leicht

Reduziert Zug und Gewicht auf den Atemwegszugang

Optimale Befeuchtung

Reduziert Nebenwirkungen, die mit dem Einatmen von kalten und trockenen Gasen über einen längeren Zeitraum verbunden sind

Integrierter Swivel-Sauerstoffanschluss

Ermöglicht schnellen und bequemen Anschluss von zusätzlichem Sauerstoff und kann bei Nichtgebrauch eingeklappt werden

Artikel-Nr.	Produkt	Länge	VE
1875000 (S*)	Inter-Therm T+ HME		25 (100*)
1875001 (S*)	Inter-Therm T+ HME mit Sauerstoffschlauch	1.8 m	40 (20*)

Durchschnittliches Fi O₂ bei variablen O₂ Flowraten

Artikel-Nr.	1875000 (S*)	1875001 (S*)	Sauerstoff (L/min)	Fi O ₂ bei 15 BPM
Feuchteverlust	13.1 mg H ₂ O/L	13.1 mg H ₂ O/L	1	26.5 %
Feuchterückführung	26.1 mg H ₂ O/L	26.1 mg H ₂ O/L	2	32.2 %
Widerstand bei 30L/min	0.4 cm H ₂ O	0.4 cm H ₂ O	3	35.0 %
Widerstand bei 60L/min	1.1 cm H ₂ O	1.1 cm H ₂ O	4	38.2 %
Kompressibles Volumen	19 ml	19 ml	5	41.8 %
Gewicht	9 g	9 g	6	44.9 %
Konnektoren	15F	15F	7	47.9 %
Minimales Tidavolumen	>60 ml	>60 ml	8	50.6 %
Zubehör		1.8 m Sauerstoffschlauch		

S Sterile Option verfügbar.

(S*) Hängen Sie an die siebenstellige Artikelnummer ein S an, um die sterile Version dieses Artikels zu bestellen, z.B. 1875000S (VE der sterilen Option in Klammern).

IS12.23 • Issue 4 07.24



Intersurgical Beatmungsprodukte GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 St. Augustin
T: +49 (0)2241 25690 anfrage@intersurgical.de www.intersurgical.de



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO
14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 und MDSAP



Bitte recyceln