

STARMed Ventukit

Helm mit eingebautem Venturi-Flowtreiber für CPAP-Therapie




STARMed Ventukit

Helm für CPAP-Therapie mit Venturi-Flowtreiber

StarMed Ventukit

Das StarMed Ventukit wurde speziell für die Verwendung an vorhandenen O₂-Quellen entwickelt. Das Ventukit enthält einen CaStar CPAP Helm mit Patientenzugang, Venturi-Flowtreiber, Silencer, bidirektionalem Notluftventil, einstellbarem PEEP-Ventil und Ohrstöpseln.

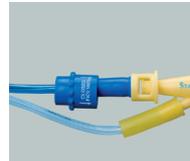

Eingebauter Venturi-Flowtreiber für FiO₂-Werte zwischen 40% und 100%. Inklusive Silencer, der Geräusche im Helm um bis zu 10 dB reduziert.



Integrierter Druckmesser und einstellbares PEEP-Ventil



Ohrstöpsel zur weiteren Geräuschreduzierung während Langzeit-Anwendungen



Der Ventukit-Schlauchsatz wird an einem Doppel-Flowmeter (nicht enthalten) konnektiert.

Die Therapie wird durch Anschluss des Ventukits an die im Krankenhaus verfügbaren O₂-Quellen aktiviert. Das Ventukit bietet:

- Komfort
- Einfache Anwendung
- Verlässlichkeit



CE-zertifiziertes Produkt

Leistungsübersicht

Bedarf		Einstellung	Gelieferter Flow	Bedarf		Einstellung	Gelieferter Flow
FiO ₂ (*) circa	Peep cm H ₂ O	Flow O ₂ l/min (A) + (B)	Flow circa l/min	FiO ₂ (*) circa	Peep cm H ₂ O	Flow O ₂ l/min (A) + (B)	Flow circa l/min
40%	5	10 + 0	46	60%	5	8 + 17	52
	7.5	11 + 0	47		7.5	9 + 14	48
	10	12 + 0	48		10	10 + 13	48
	12.5	13 + 0	46		12.5	11 + 12	47
50%	5	9 + 8	47	100%	Zur Behandlung mit 100%igem Sauerstoff beide Schläuche an der O ₂ -Quelle anschließen. Minimale O ₂ -Flow-Rate zum Ventukit: 40 l/min.		
	7.5	10 + 7	47				
	10	11 + 5	45				
	12.5	12 + 5	48				

Ventukit CPAP-Helm mit Notluftventil, Patientenzugang, einstellbarem PEEP-Ventil und Ohrstöpseln

Artikelnummer	Größe	Halsumfang	VE
CV100XXL/2	Extragroß Plus	≥ 50 cm	5
CV100XL/2	Extragroß	45-52 cm	5
CV100L/2	Groß	40-47 cm	5
CV100M/2	Medium	34-41 cm	5
CV100S/2	Klein	27-34 cm	5
CV100XS/2	Extraklein	17-27 cm	5

Einzel verpackt. Mindestbestellmenge: 1 VE (5 Stück)



INTERSURGICAL
BEATMUNGS-PRODUKTE GMBH

Intersurgical GmbH Deutschland, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin
T: 02241-311063 F: 02241-313143 anfrage@intersurgical.de | www.intersurgical.de

Hergestellt durch Intersurgical S.p.A.

