



# STARMed Ventumask Basic

CPAP-Maske mit Venturi-Flowtreiber und verstellbarem PEEP-Ventil



Critical Care ▪ Nicht-invasive Ventilation ▪ **STARMed**



# STARMed Ventumask Basic mit Venturi-Flowtreiber & verstellbarem PEEP-Ventil

## StarMed Ventumask Basic

StarMed Ventumask Basic ist eine innovative Maske für die CPAP-Therapie und wird ganz einfach durch Anschluss an verfügbare O<sub>2</sub>-Quellen aktiviert. Sie eignet sich auch für den Einsatz im Rettungsdienst und in der Notfallversorgung.

### Vorteile und technische Eigenschaften

- Ventumask Basic ist eine besonders anwenderfreundliche Komplettlösung: O<sub>2</sub>-Schlauch, Venturi-Flowtreiber und PEEP-Ventil sind bereits in der CPAP-Maske integriert.
- Der integrierte Venturi-Flowtreiber wird über ein Einzel-Flowmeter betrieben: für hohe Flows bei reduziertem Druckgasverbrauch.
- Das eingebaute PEEP-Ventil wurde exklusiv für die Ventumask Basic entworfen. Einige vorkalibrierte Einstellungen (5 - 7.5 - 10 - 12.5 cm H<sub>2</sub>O) erleichtern die Anwendung.
- FiO<sub>2</sub>-Werte von 40% bei jedem PEEP-Niveau möglich.
- Jeder Maske liegt eine Leistungstabelle bei: Darstellung möglicher Flows bei verschiedenen PEEP-Einstellungen.



### Komponenten der Ventumask Basic:

- CPAP-Maske mit Sicherheitsventil und Port zum Monitoring von FiO<sub>2</sub> oder Druck
- Integrierter Venturi-Flowtreiber
- Verstellbares Gurtgeschirr
- Verstellbares PEEP-Ventil mit einigen vorkalibrierten Einstellungen
- Integrierter Sauerstoffschlauch

### Leistungsübersicht Ventumask Basic:

Bedarf		Einstellung	Gelieferter Flow
FiO <sub>2</sub> ca.	PEEP cm H <sub>2</sub> O	Flow O <sub>2</sub> L/min	Flow ca. L/min
40%	5	12	57
	7.5	12	52
	10	12	47
	12.5	12	42

Artikelnr.	Produkt	Größe	VE
CV203S	CPAP-Maske mit integriertem Venturi-Flowtreiber und verstellbarem PEEP-Ventil	Klein	5
CV203M/L	CPAP-Maske mit integriertem Venturi-Flowtreiber und verstellbarem PEEP-Ventil	Medium / Groß	5
CV203XL	CPAP-Maske mit integriertem Venturi-Flowtreiber und verstellbarem PEEP-Ventil	Extragroß	5



[www.intersurgical.com/info/starmed](http://www.intersurgical.com/info/starmed)



CE-zertifiziert  
Produziert durch: Intersurgical S.p.A.  
IS1.45\_ROW • Issue 1 07.15



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin

T: 02241-311063 F: 02241-313143 [anfrage@intersurgical.de](mailto:anfrage@intersurgical.de) | [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)

UK ▪ France ▪ Germany ▪ Spain ▪ Portugal ▪ Italy  
Netherlands ▪ Sweden ▪ Lithuania ▪ Russia ▪ South Africa  
Japan ▪ Philippines ▪ USA ▪ Colombia ▪ Australia



Intersurgical Ltd ist zertifiziert nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO 13485.